



Caractéristiques techniques



Scannez le code QR avec
votre téléphone portable
pour en savoir plus
sur Multidem.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Une eau ultra-pure
pour tous les systèmes

	Multidem C27
Pression de fonctionnement :	2 bar – 8,6 bar maxi.
Température eau courante :	4 – 30 °C / 40 – 86 °F
Débit nominal :	60 l/h
Qualité d'eau en sortie :	déminéralisée (EN 13060)
Qualité d'eau entrée :	eau potable
Poids :	2,7 kg
Largeur / Profondeur / Hauteur :	124 / 123 / 476 mm
Position de fonctionnement :	verticale
Longueur tuyau :	2 x 3 m
Vanne de sécurité :	oui
Clapet anti-retour :	



Multidem C27 est livré avec :

Tête de filtre
Cartouche de 2,7 kg
Tuyaux et raccords
(et Water Block®)

Pistolet de distribution en option

Pistolet de distribution
Tuyaux et raccords

Si le déminéralisateur est connecté à un appareil, vérifiez que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher le reflux conformément aux directives, normes et prescriptions nationales en vigueur.



Fabricant :

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t. + 39 035-66 63 000
f. + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

multidem

Une nouvelle génération de traitement d'eau

Profitez maintenant de tous les avantages que procure le nouveau système de traitement d'eau Multidem de W&H.



Multidem fournit de l'eau déminéralisée d'excellente qualité pour la génération de vapeur dans les stérilisateurs. Il garantit ainsi des performances homogènes et optimales à votre stérilisateur

ou appareil de traitement d'eau tout en prolongeant sa durée de vie. Par ailleurs, l'appareil est équipé d'un pistolet de distribution et convient parfaitement au rinçage des instruments avant la stérilisation.




Cartouche recyclable

Très simple à utiliser et à manipuler



1.
Pour remplacer la cartouche de filtre usagée, soulevez le levier.



2.
Pivotez le levier jusqu'en butée, appuyez sur le bouton de purge pour libérer la pression et retirez la tête de filtre de la cartouche usagée.



3.
Après avoir retiré le capuchon de protection, placez la tête de filtre verticalement sur la nouvelle cartouche, verrouillez le levier.

Compatible avec tous les appareils

Le déminéralisateur Multidem est compatible avec la majorité des stérilisateurs et unités de traitement d'eau.



* pour les stérilisateurs Lisa auto fabriqués à partir de 04/2011

L'essentiel des avantages en un clin d'œil

Convivial

- > Remplacement des cartouches rapide et sans outil
- > Le déminéralisateur est positionné sur un socle et ne requiert pas de système de fixation

Compatible

- > Utilisable avec tous les stérilisateurs et systèmes de traitement d'eau courants
- > Souplesse d'utilisation avec le pistolet de distribution

Économique

- > Pas d'alimentation électrique nécessaire
- > Résines d'échange ionique optimisées

Sûr

- > L'eau ultra-pure est conforme aux recommandations et directives en vigueur relatives aux stérilisateurs à vapeur et à la préparation des instruments
- > Qualité constante de l'eau, pas de dépôt de calcaire

