

COVID-19 protocoles de (re)démarrage équipement dentaire



Checklist pour les unités de traitement

- ☐ Désinfectez tous les points de contact et les surfaces horizontales avec de l'alcool à 80%.
- ☐ Graissez tous les joints toriques avec de la vaseline sans acide (pièces à main d'extracteurs, micromoteurs et raccords de turbine).
- ☐ Rincez les tuyaux d'aspiration; rincez avec du MD555 (laissez tremper pendant au moins une demi-heure - maximum 2 heures).
- ☐ Activez les programmes de rinçage, faites attention à la durée ! (Par exemple, DentsplySirona a un programme de 24 heures.)

Suivez la procédure et utilisez les moyens appropriés, consultez notre site web pour connaître [les protocoles d'hygiène](#) de nos fabricants. Consultez la page suivante pour trouver des désinfectants spécifiques par marque.

- ☐ Vérifiez la qualité de l'eau en effectuant un test après le programme de rinçage.
- ☐ Rincez les bouches et tuyaux d'aspiration et remplacez les filtres correspondants. Aspirez plusieurs litres d'eau pour rincer les tuyaux et utilisez les désinfectants associés au moteur d'aspiration, par exemple OROTOL pour les moteurs d'aspiration de Dürer.

Checklist salle mécanique

- ☐ Laissez tourner le moteur d'aspiration pendant au moins 10 minutes pour "chauffer".
- ☐ Faites fonctionner le compresseur pendant au moins 10 minutes pour "chauffer".
- ☐ Remplacez les filtres.
- ☐ Vérifiez le réservoir (réceptacle) du séparateur d'amalgame.

Checklist imagerie

- ☐ Désinfectez tous les points de contact et les surfaces horizontales avec de l'alcool à 80%.

Checklist CEREC

- ☐ Placez un nouveau filtre dans le réservoir d'eau.
- ☐ Remplissez le réservoir d'eau et remettez la pompe en marche selon la procédure habituelle.

Pour toutes questions concernant l'assistance technique, vous pouvez nous envoyer un courriel à tech@henryschein.be avec les données de votre cabinet dentaire et votre question. Un membre de l'équipe Schein vous contactera pour planifier un rendez-vous.

COVID-19 protocoles de (re)démarrage équipement dentaire



Désinfectants spécifiques par marque et par fabricant:

A-DEC

- **Dürr, FD360:** entretien skai - recommandé avant d'utiliser le fauteuil et pour l'entretien
- **Dürr MD-555:** pour rincer les tuyaux
- **Dürr MD-550:** pour nettoyer le crachoir
- **Dürr Orotol Plus:** nettoyage de l'aspiration
50 ICX tablettes

CEFLA (ANTHOS/STERN WEBER)

- **Dürr, FD360:** entretien skai - recommandé avant d'utiliser le fauteuil et pour l'entretien
- **Cefla Peroxy AG+:** décontamination intérieur des tuyaux (pour WHE et BIOSTER = réceptacle en haut de l'appareil)
- **Cefla Ster 1:** décontamination fauteuil et instruments
- **Cefla Ster 3:** décontamination tuyaux (réservoir en bas)
- **Dürr Orotol Plus:** nettoyage de l'aspiration
- **En cas d'un Metasys:** Green & Clean recharge

KAVO

- **Dürr, FD360:** entretien skai - recommandé avant d'utiliser le fauteuil et pour l'entretien
- **Dekaseptol gel:** désinfection et nettoyage des tuyaux d'aspiration
- **Oxygenal 6:** pour la désinfection des instruments

DentsplySirona

- **Dentosept**
- **Dürr, FD360:** entretien skai - recommandé avant d'utiliser le fauteuil et pour l'entretien
- **Alpro Jet ou Dürr Orotol Ultra/Plus:** nettoyage de l'aspiration

XO CARE - recouvrement skai

NETTOYER:

- **Dürr, FD360:** entretien skai: recommandé avant d'utiliser le fauteuil et pour l'entretien

DÉSINFECTION:

- **Metasys:** Green & Clean SK

XO CARE - recouvrement Comfort

NETTOYER:

- **Dürr, FD360** (l'éponge livrée d'origine avec le FD360 ne convient pas au confort)

- **XO AP-833**

DÉSINFECTION:

- **Dürr, FD366**
- **XO AP-832**, convient aussi pour désinfecter les surfaces

XO CARE - surfaces unité

DÉSINFECTION

- **Dürr FD333**
- **XO AP-831**, ne pas utiliser sur les surfaces peintes du fauteuil XO et les surfaces XO Comfort et Scuba.

Voir aussi guide de nettoyage des selleries de XO CARE pour: XO Waterclean, XO Suction Disinfection, XO Intensive Disinfection, XO Gentle Disinfection, XO Fabric Make-Up

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement les recommandations et le mode d'emploi accompagnant le consommable, en particulier en ce qui concerne la quantité à utiliser, le nombre de fois par jour, le nombre de fois par semaine.

Par exemple - MD555 (Dürr): à utiliser 1x par semaine.

Produit assez agressif, donc rincer abondamment.

Pour toutes questions concernant l'assistance technique, vous pouvez nous envoyer un courriel à tech@henryschein.be avec les données de votre cabinet dentaire et votre question. Un membre de l'équipe Schein vous contactera pour planifier un rendez-vous.