

COVID-19 (her)opstart protocollen dentale equipment



Checklist Behandeleenheden

- Desinfecteer alle contactpunten en horizontale oppervlakken met alcohol 80%.
- Alle "O" ringen invetten met zuurvrije vaseline (*afzuigerhandstukken, micromotoren en turbinekoppelingen*).
- Afzuigslangen reinigen; spoelen met MD555 (*minimaal half uur in laten trekken - max 2 uur*).
- Activeer spoelprogramma's, let op de duur! (*bv. DentsplySirona kent een 24-uursprogramma*).

Gebruik hiervoor de juiste procedure en middelen, raadpleeg onze website voor de [hygiëneprotocollen](#) van onze fabrikanten. Kijk voor merkspecifieke desinfectiemiddelen op de volgende pagina.

- Controleer de waterkwaliteit door na het spoelprogramma een test uit te voeren.
- Reinig de afzuigingen en vervang de betreffende filters. Zuig enkele liters water op voor het spoelen van de leidingen en gebruik de desinfectiemiddelen die bij de afzuigmotor horen, bv. OROTOL bij Dürr afzuigmotoren.

Checklist Technische Ruimte

- Laat de afzuigmotor minimaal 10 minuten draaien om "warm te draaien".
- Laat de compressor minimaal 10 minuten draaien om "warm te draaien".
- Vervang de filters.
- Controleer het reservoir (opvangbakje) van de amalgaamscheider.

Checklist Röntgen / Röntgenruimte

- Desinfecteer alle contactpunten en horizontale oppervlakken met alcohol 80%.

Checklist CEREC

- Nieuwe filter in de watertank plaatsen.
- Watertank vullen en pomp weer aanzetten conform de standaardprocedure.

Voor alle vragen i.v.m. technische ondersteuning kunt u ons mailen via tech@henryschein.be met de gegevens van uw praktijk en uw vraag. Een medewerker van het betreffende team zal contact met u opnemen voor een afspraak.

COVID-19 (her)opstart protocollen dentale equipment



Merkspecifieke desinfectiemiddelen per fabrikant:

A-DEC

- **Dürr, FD360:** onderhoud skai - aanbevolen vooraleer stoel te gebruiken en voor onderhoud
- **Dürr MD-555:** voor spoelen van de leidingen
- **Dürr MD-550:** voor reinigen spoelkom
- **Dürr Orotol Plus:** reinigen van afzuiging
- 50 **ICX** tabletten

CEFLA (ANTHOS/STERN WEBER)

- **Dürr, FD360:** onderhoud skai - aanbevolen vooraleer stoel te gebruiken en voor onderhoud
- **Cefla Peroxy AG+:** ontsmetting binnenkant leidingen (voor WHE en BIOSTER = bakje bovenaan)
- **Cefla Ster 1:** ontsmetten zetel en instrumenten
- **Cefla Ster 3:** ontsmetten leidingen (tank beneden)
- **Dürr Orotol Plus:** reinigen van afzuiging
- Bij **Metasys:** Green & Clean navulling

KAVO

- **Dürr, FD360:** onderhoud skai - aanbevolen vooraleer stoel te gebruiken en voor onderhoud
- **Dekaseptol gel:** desinfectie en reiniging van de afzuigslangen
- **Oxygenal 6:** voor desinfectie instrumenten

DentsplySirona

- **Dentosept**
- **Dürr, FD360:** onderhoud skai - aanbevolen vooraleer stoel te gebruiken en voor onderhoud
- **Alpro Jet of Dürr Orotol Ultra/Plus:** reinigen van afzuiging

XO CARE - Skai bekleding

REINIGEN:

- **Dürr, FD360:** onderhoud skai - aanbevolen vooraleer stoel te gebruiken en voor onderhoud

DESINFECTIE:

- **Metasys:** Green & Clean SK

XO CARE - Comfortbekleding

REINIGEN:

- **Dürr, FD360** (het meegeleverde sponsje niet gebruiken!)
- **XO AP-833**

DESINFECTIE:

- **Dürr, FD366**
- **XO AP-832**, mag ook gebruikt worden om de oppervlakken te desinfecteren

XO CARE - oppervlakken unit

DESINFECTIE:

- **Dürr FD333**
- **XO AP-831**, niet gebruiken op gelakte oppervlakken van de XO stoel en XO Comfort en Scuba oppervlakken!

Zie ook de richtlijnen van XO CARE voor: **XO Waterclean, XO Suction Disinfection, XO Intensive Disinfection, XO Gentle Disinfection, XO Fabric Make-Up**

BELANGRIJK! Gelieve de voorschriften en gebruiksaanwijzingen, vermeld op het verbruiksartikel, vóór het gebruik precies na te lezen en dit vooral i.v.m. de te gebruiken hoeveelheid, het aantal maal per dag, het aantal maal per week. Bijvoorbeeld: MD555 (Dürr) 1x per week te gebruiken. Vrij agressief product, dus goed naspoelen.

Voor alle vragen i.v.m. technische ondersteuning kunt u ons mailen via tech@henryschein.be met de gegevens van uw praktijk en uw vraag. Een medewerker van het betreffende team zal contact met u opnemen voor een afspraak.