

XO NEWS



Recommandations de XO CARE concernant les unités non utilisées normalement

De nombreuses cliniques dentaires en Europe travaillent actuellement avec une capacité limitée ou ont été temporairement fermées en raison de la COVID-19. Nous avons donc préparé une série de recommandations pour les unités dentaires XO qui ne sont pas utilisées normalement. Voir ci-dessous.

Avant de fermer le cabinet, nous vous recommandons de suivre les procédures suivantes :

A. Unités XO avec système de désinfection de l'eau intégré

1. Les instruments sont placés dans le support d'instruments placé sur le crachoir. Exécutez la première partie du processus de désinfection de l'eau en deux étapes pour vider l'appareil de son eau et éteignez-le comme indiqué sur l'écran.
2. À la réouverture du cabinet, la cartouche d'adoucissement UH-200 doit être remplacée si l'appareil n'a pas été utilisé pendant 4 semaines ou plus.
3. Faites couler l'eau du robinet, qui est la plus proche de l'unité dentaire, pendant un certain temps jusqu'à ce que l'eau soit froide, afin d'assurer que l'eau stagnante dans les tuyaux soit rincée.
4. Mettez l'appareil en marche et la deuxième partie de la désinfection de l'eau démarrera automatiquement, en remplissant le réservoir d'eau et en rinçant les instruments et le remplisseur de gobelets.
5. Effectuez le processus de désinfection de l'eau en une étape (FLUSH, "désinfection intensive") 3 fois.

Note : Les instruments doivent être réinitialisés après chaque processus FLUSH !

6. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

B. Unités XO sans système de désinfection de l'eau

1. Il n'est pas possible de vider l'unité - l'eau de traitement reste dans l'unité. Le biofilm se développera, mais c'est la même situation que lorsque la clinique est quittée pour, par exemple, les vacances d'été ou des vacances plus longues.
2. À la réouverture de la clinique, la cartouche d'adoucissement d'eau UH-200 sera remplacée si l'appareil n'a pas été utilisé pendant 4 semaines ou plus.
3. Faites couler l'eau du robinet la plus proche de l'unité dentaire pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'eau soit froide, afin d'éliminer l'eau stagnante dans les tuyaux.
4. Mettez l'appareil en marche et activez le rinçage du crachoir pendant au moins 3 minutes.
5. Tirez tous les instruments porteurs d'eau vers l'avant, laissez-les dans la taie d'oreiller ou dans un seau et actionnez la manette de commande au pied NORD. Tous les instruments sont rincés pendant 3 minutes.
6. Répétez le processus ci-dessus 3 fois pour vous assurer que toute l'eau contenue dans l'appareil est "fraîche".
7. Activez le remplisseur gobelets et remplissez un gobelet 5 fois.
8. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.