

MELAG

Interruptions opérationnelles

Durée de l'interruption d'exploitation	Mesures
Courtes pauses entre deux stérilisations	▪ Gardez la porte fermée pour économiser de l'énergie ▪ Activez le mode d'économie d'énergie
Pauses de plus d'une heure	▪ Éteignez l'autoclave
Pauses plus longues, par exemple la nuit ou le week-end	▪ Éteignez l'autoclave ▪ Entrouvrez la porte pour éviter l'épuisement prématuré ou le collage du joint de porte ▪ Si présent, fermez l'alimentation en eau de la station de traitement d'eau
Plus de deux semaines	▪ Effectuer un test de vide. ▪ Après un test de vide réussi, effectuez la stérilisation à vide avec le Programme Rapide 'S'