

Il est important de respecter les protocoles du fabricant (voir les manuels / les sites web des fabricants).

Nettoyage de la bouteille A-dec :

Remplissez la bouteille avec un mélange d'eau de Javel (hypochlorite de sodium, concentration 0,5%) dans un rapport de 1:10. Remplissez le flacon avec cette solution et laissez reposer pendant 10 à 20 minutes.

Rincez ensuite la bouteille à fond avec de l'eau !

Le tube de remplissage peut être nettoyé intérieurement avec une brosse (par exemple : A-dec 049.005.01 ou A-dec 049.002.01).

En cas d'interruptions prolongées, videz le réservoir et ne le remplissez à nouveau qu'à la reprise des travaux après que la désinfection/le nettoyage ait été effectué conformément aux instructions susmentionnées.

Rinçage des conduites d'eau par le biais d'un système d'eau autonome (au début des travaux / pour l'entretien quotidien de la ligne de conduites d'eau) :


Jetez un comprimé ICX dans la bouteille d'eau.

- 1.) Remplissez la bouteille avec de l'eau du robinet.
- 2.) Attendez 2 minutes que la tablette ICX soit complètement dissoute.

Vous pouvez activer la fonction de rinçage à l'arrière du pont d'instruments :

Les tuyaux des instruments (sans contre-angles) peuvent être rincés en même temps.

La ou les seringues multifonctions doivent être activées séparément en appuyant sur le bouton d'eau de la seringue.

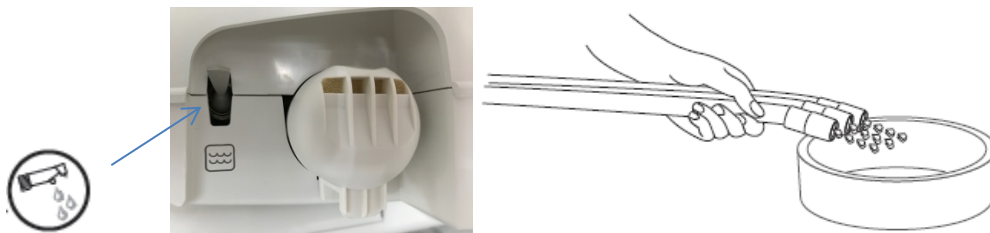

Les tablettes ICX A-dec code 90.1065.00 (ICX 2 litres) / A-dec code 90.1064.00 (ICX 0,7 litre) peuvent être commandées via notre service pièces détachées : 02 257 40 50, 2 pour le français – 3 pour service technique – 2 pour pièces détachées / spareparts@henryschein.be.

En cas de contamination de la ligne des conduites d'eau interne, nous vous conseillons de contacter le service technique pour effectuer un traitement de choc (02 257 40 50, 2 pour le français – 3 pour service technique – 1 pour service dispatching / tech@henryschein.be).

Testez ou contrôlez la quantité de bactéries dans l'eau à l'aide d'une bandelette de test telle que l'Alpro Biotest Plus (remarque : cette valeur ne donne qu'une indication).