



AVEC **FUTAR**<sup>®</sup>, C'EST LE T O O O P

ENREGISTREMENTS DE L'OCCLUSION



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# FUTAR® – TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT !

## Enregistrement de l'occlusion

La famille Futar® se décline en sept versions de matériaux à base de silicone A pour l'enregistrement des rapports occlusaux.

### SUPER QUALITÉ

- Pour des enregistrements occlusaux précis

### SUPER POLYVALENCE

- Le choix selon vos besoins entre une dureté élevée ou maximale et un temps de prise standard ou rapide!

### SUPER DANS LA FIABILITÉ ET LA CONTINUITÉ

- Testé et éprouvé à de nombreuses reprises avec une qualité toujours fiable

**Ne faites aucun compromis pour votre enregistrement de l'occlusion !**



# FUTAR® – VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

## Futar® / Futar® Fast :

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Dureté dans la prise, flexible dans l'usinage : facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast : pour un plus grand confort du patient !

## Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Peu d'effet de ressort
- ✓ Facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast
- ✓ Faible force de distribution – facile à appliquer



La gamme Futar® peut  
bien plus encore :

## Futar® D / Futar® D Fast :

- ✔ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✔ Excellente usinabilité
- ✔ Aussi disponible en variante Fast : pour un plus grand confort du patient !



## Futar® D Slow :

- ✔ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✔ Durée de préparation extra-longue pour les applications longues, comme l'enregistrement de l'occlusion myocentrique, la fixation de piliers d'empreinte ou le façonnage personnalisé des bords
- ✔ Utilisation polyvalente, également indiqué en laboratoire





- Précision du résultat grâce aux excellentes propriétés viscoélastiques
- La faible élasticité empêche l'effet de ressort lors de l'articulation du modèle
- Élimination aisée des excédents par rupture

**UTILISATION  
SIMPLE, PROPRE  
ET RAPIDE !**










# FUTAR® – LES PERFORMANCES

## Arcade dentaire

| <br>Matériau d'enregistrement de l'occlusion | <br>Mélange | <br>Durée de préparation à 23 °C | <br>Durée de prise en bouche | <br>Durée totale de la prise* | <br>Dureté (env.) Shore |
|---|--|---|---|--|--|
| <b>Futar®</b>   |             | 30 s  | 90 s  | <b>02:00 min</b>   | A 90   |
| <b>Futar® Easy</b>  |            | 30 s  | 90 s  | <b>02:00 min</b>   | A 90   |
| <b>Futar® D</b>   |           | 30 s  | 90 s  | <b>02:00 min</b>   | D 43   |
| <b>Futar® D Slow</b>  |           | 90 s  | 03:00 min   | <b>04:30 min</b>   | D 43   |

\* Durée totale de la prise (retrait de la bouche) depuis le début du mélange.

## Segment

| <br>Matériau d'enregistrement de l'occlusion | <br>Mélange | <br>Durée de préparation à 23 °C | <br>Durée de prise en bouche | <br>Fin de prise* | <br>Dureté (env.) Shore |
|---|--|---|---|--|--|
| <b>Futar® Fast</b>  |             | 15 s  | 45 s  | <b>01:00 min</b>   | A 90   |
| <b>Futar® Easy Fast</b>   |             | 15 s  | 45 s  | <b>01:00 min</b>   | A 90   |
| <b>Futar® D Fast</b>  |             | 15 s  | 45 s  | <b>01:00 min</b>   | D 43   |

\* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

Réalisez  
votre enregistrement  
de l'occlusion  
**EN UNE SEULE  
MINUTE !**

# FUTAR® – LA GAMME



| Produits                | Normal pack<br>2 cartouche de 50 ml,<br>6 embouts mélangeurs bleus | Bonus pack<br>10 cartouche de 50 ml,<br>30 embouts mélangeurs bleus |
|-------------------------|--|---|
| <b>Futar®</b>           | REF 1191211  | REF 2827711   |
| <b>Futar® Fast</b>      | REF 1192611  | REF 2827611   |
| <b>Futar® Easy</b>      | REF 1192311  | –   |
| <b>Futar® Easy Fast</b> | REF 1192411  | –   |
| <b>Futar® D</b>         | REF 1193211  | REF 2827811   |
| <b>Futar® D Fast</b>    | REF 1196111  | REF 2827911   |
| <b>Futar® D Slow</b>    | REF 1195111  | –   |



## NOTES

---



---



---



---



---

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
Tél. : +33 3 87 28 86 17  
Mobile: +33 6 43 27 82 04  
contact-fr@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.fr

Utilisation, vente et distribution  
interdites en Allemagne.



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent



012736\_0924