



Nog meer voordelen
NIEUWE ADHESIEF



SOO ODUURZAAM IS **MUCOPREN®** SOFT

COMFORTABELE SOFTLINER



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Prothetische relining

Mucopren® Soft is een zacht materiaal voor langdurige relining op basis van A-silicone voor de **directe en indirecte toepassing**

Speciale langdurige hechting:

Uitstekende hechting aan prothesekunststof dankzij de gepatenteerde Mucopren® Adhesief

Unieke afdichting door het zeer gladde, hydrofobe siliconenoppervlak:

Remt bacteriële kolonisatie en zorgt zo voor hygiënische omstandigheden rondom de prothese¹⁾



Toepassingsvideo

Eenvoudige behandeling & snelle verwerking

Snellere procedure en kortere verwerkingstijden zorgen voor een snel en soepel proces in de praktijk en het laboratorium.

Ondersteunt het genezingsproces na een implantaatbehandeling

Zeer geschikt voor gebruik in de implantologie voor probleemloze osseo-integratie

Hoog draagcomfort

De Mucopren® Soft reliner is volledig geur- en smaakloos en maakt het dragen van de prothese zo aangenaam mogelijk.

Voordelige mengtip

De nieuwe blauwe mengtip heeft tot 20% minder verlies dan de vorige groene mengtip (Ø 6.5 mm) voor Mucopren® Soft

Tot
20%
minder restmateriaal

Marktleider op het gebied van softreliners met een extreem lange draagtijd³⁾

MUCOPREN® SOFT DOET WAT HET BELOOFT



VERDERE AANWIJZINGEN



- Voor het vervaardigen van **langdurige zachtblijvende relining**.
- Voor het ontlasten van het operatieve gebied na het plaatsen van de **implantaten**.
- Voor het compenseren van slijmvlieslocaties met verschillende weerstanden.
- Voor het ontlasten bij gevoelige botranden.
- Voor het ontlasten bij gevoelige gehemelte-slijmvlies (stomatitis prothetica)
- Voor het vervaardigen en/of relinen van obturatoren.
- Voor het maken en relinen van obturators

Voordelen van het gebruik van het nieuwe Adhesief

SLECHTS
1X AANBRENGEN



CHAIRSIDE

3 MIN

De verwerkingstijd is gereduceerd tot slechts 3 minuten na het verwijderen van de mond. Geen waterbad nodig.



LABSIDE

3 MIN

De verwerkingstijd is gereduceerd tot slechts 3 minuten in het waterbad of de hoge drukpan.

¹⁾ Resultaat van in-vitro-onderzoeken waarin werd aangetoond dat de groei van *Candida albicans* werd voorkomen dankzij het gladde siliconenoppervlak.





²⁾ Vergelijken met de vorige groene mengtip voor Mucopren® Soft (Ø 6.5 mm)

³⁾ volgens GfK (een Duitse vereniging voor consumentenonderzoek)

MUCOPREN® SOFT – HET ASSORTIMENT



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Basic Set	REF 28105	50 ml Mucopren® Soft, 50 ml verzegelingssilicone, 10 ml adhesief 6 blauwe mengtips, 16 rode mengtips, 1 borstelhouder 20 borstels voor eenmalig gebruik, 1 stalen frees, accessoires	 
Mucopren® Soft Normal pack	REF 15687	2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 blauwe mengtips	
Mucopren® Verzegelingssilicone	REF 15686	50 ml Mucopren® Verzegelingssilicone, 8 rode mengtips	
Mucopren® Adhesief	REF 14203	10 ml Mucopren® Adhesief	



Technische gegevens

Productnaam	Mengverhouding	Verwerkingstijd bij 23 °C ≤	Uithardingstijd bij 35 °C ≥	Drukpan	Totale uithardingstijd ≥	Shore hardheid (ongeveer.)
Mucopren® Soft – Directe toepassing	1:1	2:15 min.	3:15 min.	Niet van toepassing	5:30 min.*	A 28
Mucopren® Soft – Indirecte toepassing	1:1	2:15 min.	Niet van toepassing	3:00 min.	> 3 min.	A 28
Mucopren® Soft Verzegelingssilicone	1:1	1:30 min.	Niet van toepassing	Niet van toepassing	6:30 min. at 23°C	A 33

*Totale uithardingstijd (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het aanbrengen in de prothese

NOTES

Voor meer informatie vraag uw dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda

info@dental4.nl
www.dental4.nl



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

022746_5023

